

**ORMED**

Flex-F01



## Подготовка к проведению процедуры

### Настройка аппарата под пациента


\*аппарат предназначен как для правой, так и для левой ноги.



1 Включите аппарат в сеть и нажмите кнопку ON/OFF.



2 Измерьте длину бедра пациента от коленного до тазобедренного сустава. Запишите значение в карту пациента

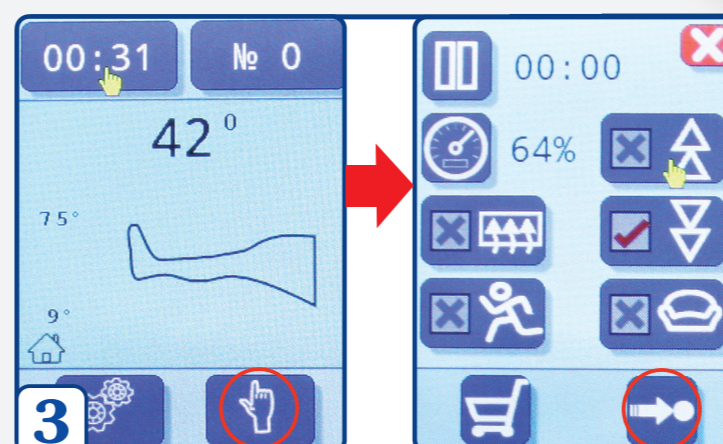

3 Установите аппарат в «домашнее положение».



4 Установите измеренное значение на шкале длины бедра. Зафиксируйте.



5 Отрегулируйте высоту лотков таким образом, чтобы ось аппарата совпадала с осью вращения коленного сустава в вертикальной и горизонтальной плоскости.



7 Ослабьте верхние фиксаторы и отрегулируйте положение лотка для стопы.




8 Отрегулируйте угол положения стопы. Зафиксируйте стопу ремнями.




9 Отрегулируйте угол поворота и высоты стопы.

**Важно!** При несовпадении осей разработка будет происходить неверно и может повлечь ухудшение состояния.


### Настройка значений пульта управления

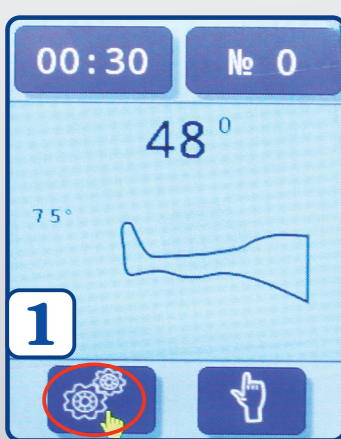


1 На пульте управления выберите меню установок мотора.

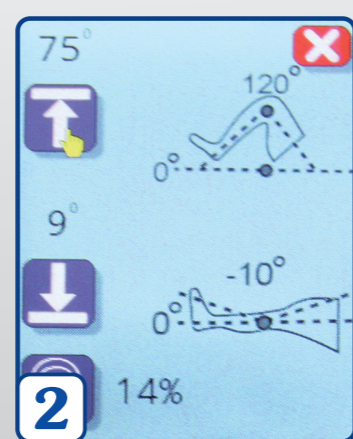


2 Задайте углы сгибания, разгибания и величину нагрузки.

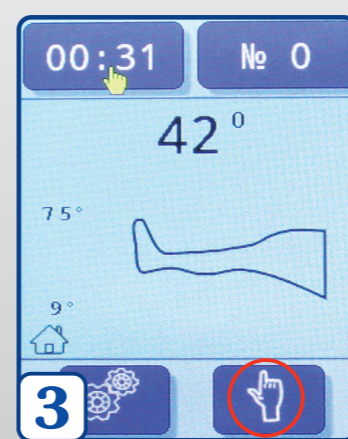


3 В меню настройки процедуры вы можете выбрать специальный режим.

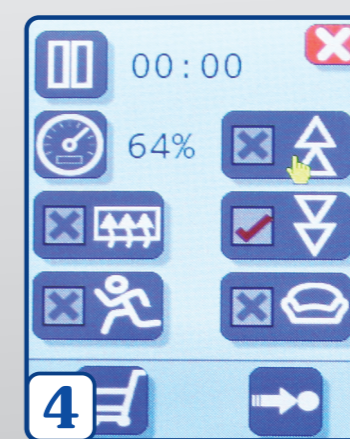

4 Специальные режимы подробно описаны в руководстве по эксплуатации.

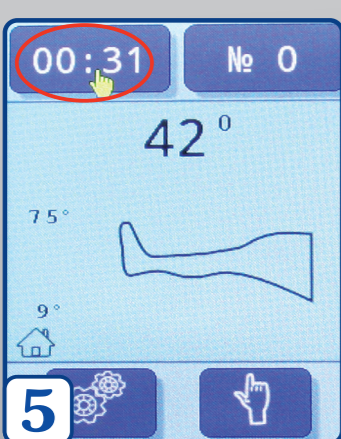

5 В основном меню задайте время процедуры.

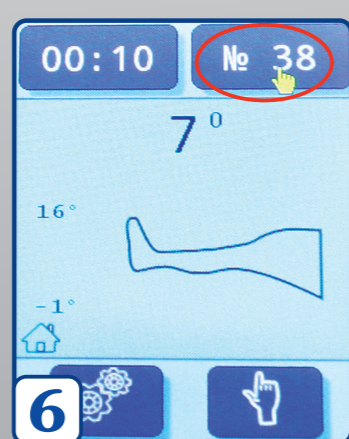

6 Выберите номер ячейки памяти и запишите его в карту пациента. В данной ячейке сохраняются последние настройки процедуры.



7 Наиболее удобный способ сохранения настроек процедуры - индивидуальная flash-карта. Вставьте ее в гнездо перед началом процедуры и параметры сохранятся автоматически.



8 Переключение параметров осуществляется кнопками + и -, выбор функции - кнопкой ОК, запуск процедуры - кнопкой ПУСК. Во время процедуры нажатие любой кнопки устанавливает аппарат на паузу.