

РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ORMED
Flex-F02

Подготовка к проведению процедуры

Настройка аппарата для правой/левой ноги

*при необходимости.



1 Включите аппарат в сеть и нажмите кнопку ON/OFF. Дождитесь полной загрузки.



2 В меню установок мотора В используйте функцию «выбор правой/левой конечности». Аппарат переместится в положение для перемены ноги.



3 Ослабьте фиксаторы и снимите узел П/С с направляющих.



4 Переверните и установите узел П/С. Зафиксируйте. Положение узла на фото соответствует левой конечности.



5 Ослабьте фиксатор, снимите опору стопы вместе с лотком и разверните носком лотка вперед. Правильное положение: пара винтов должна располагаться с внешней стороны ноги.

Подстройка аппарата под пациента.



1 Придерживая аппарат, ослабьте нижние фиксаторы и отрегулируйте высоту подъема.



2 Ослабьте верхние фиксаторы и измените угол наклона аппарата.



3 Зафиксируйте стопу ремнями.

Подстройка оси вращения голеностопного сустава.

Важно! При несовпадении осей разработка будет проходить неверно и может повлечь ухудшение состояния.



1 Ослабив фиксаторы, совместите ось вращения сустава и ось мотора А. Зафиксируйте.



2 Ослабьте фиксатор и сместите опору стопы вперед-назад.



3 Вставьте паз опоры в ограничитель и затяните фиксатор. Убедитесь, что ступня плотно прилегает к опоре.



4 Убедитесь, что оси мотора А и голеностопного сустава совпадают и в вертикальной и в горизонтальной плоскости.

Настройка значений пульта управления



1 На пульте управления выберите меню установок мотора А.



2 Задайте углы сгибания, разгибания и величину нагрузки. При необходимости данный мотор можно отключить.



3 На пульте управления выберите меню установок мотора В.



4 Задайте углы сгибания, разгибания и величину нагрузки. При необходимости данный мотор можно отключить.



5 На пульте управления выберите меню настройки процедуры. Здесь вы можете выбрать специальный режим.



6 Специальные режимы подробно описаны в руководстве по эксплуатации.



7 В основном меню задайте время процедуры.



8 Выберите номер ячейки памяти и запишите его в карту пациента. В данной ячейке сохраняются последние настройки процедуры.



9 Наиболее удобный способ сохранения настроек процедуры - индивидуальная flash-карта. Вставьте ее в гнездо перед началом процедуры и параметры сохранятся автоматически.



10 Переключение параметров осуществляется кнопками + и -, выбор функции - кнопкой ОК, запуск процедуры - кнопкой ПУСК. Во время процедуры нажатие любой кнопки устанавливает аппарат на паузу.