



**Руководство по эксплуатации
ОРБИ.941551.006 РЗ**



Уфа 2023

ДАННЫЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Тип и обозначение: Ванна гидромассажная бесконтактная «АКВА-релакс»
ТУ 9444-003-22636951-2010

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Наименование и адрес
изготовителя: ООО «НВП «Орбита»
450095, Россия, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3

Телефон: 8(800)700-86-96 (звонок по РФ бесплатный)

E-mail: ormed@ormed.ru

Сервисный центр: 8(800)700-86-96 доб. 120 (звонок по РФ бесплатный)
service@ormed.ru

 **ВНИМАНИЕ!**

1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации Ванны гидромассажной бесконтактной «АКВА-релакс» (далее – Ванна). Руководство по эксплуатации (далее – Руководство) должно находиться рядом с Ванной.

2. В холодный период года (при температуре ниже 0°C) Ванну после распаковки необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 5 часов.

3. Ванна поставляется без рабочей жидкости, а также с вывернутыми накидными гайками на всасывающей стороне насосов. В связи с этим перед заливкой рабочей жидкости в гидравлическую систему Ванны следует затянуть данные гайки до упора. Гайки затягиваются от руки.

4. Нельзя включать Ванну без залитой рабочей жидкости.

5. Для обеспечения заземления Ванны используется сетевая вилка с заземляющим контактом («евровилка»). Запрещается эксплуатация Ванны без заземления. «Евророзетка» и соответствующая электрическая подводка потребителя должны быть рассчитаны на рабочую силу тока не менее 16 А.

6. Необходимо отключать Ванну от электросети всегда, когда она не используется.

7. Не оставляйте Ванну на улице или в помещениях с повышенной влажностью. Оберегайте ее от воздействия прямых солнечных лучей, механических повреждений. Ванна является сложной технической системой и требует к себе бережного отношения.

8. Не позволяйте детям и пожилым людям пользоваться Ванной самостоятельно.

9. Для проведения процедур не требуются специалисты с высокой квалификацией, Лечебную процедуру может осуществлять медсестра или сам пациент по предписанию врача.

10. В связи с постоянным совершенствованием конструкции возможны незначительные расхождения между приобретенной вами Ванной и настоящим Руководством по эксплуатации.

11. ООО НВП «ОРБИТА» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Ванны при соблюдении правил ее эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7
4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ. СБОРКА ВАННЫ	7
5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ВАННЫ	13
6. ПРОГРАММЫ ГИДРОМАССАЖА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ВАННЫ	13
7. РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ВАННОЙ	17
8. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР ГИДРОМАССАЖА	18
9. РАБОТА ВАННЫ В РЕЖИМЕ «ПЕРЕГРЕВ»	20
10. РАБОТА ВАННЫ В «СПЯЩЕМ» РЕЖИМЕ	20
11. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	20
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	22
14. МАРКИРОВКА	22
15. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ	23
16. ТРАНСПОРТИРОВКА	23
17. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ	23
18. УТИЛИЗАЦИЯ	23
19. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	23
20. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ	24
21. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	24
22. РИСУНКИ И ФОТОГРАФИИ	25
ЗАЯВКА НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	33
ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ	35

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – «Руководство») содержит техническое описание и правила эксплуатации Ванны гидромассажной бесконтактной «АКВА-релакс» (далее – «Ванна»).

Руководство содержит в себе сведения, включаемые в Паспорт и формуляр изделия.

Руководство содержит основные технические данные Ванны, а также указания по эксплуатации, хранению, транспортировке, мерам безопасности и другие сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.



ВНИМАНИЕ! Нельзя приступать к работе с Ванной, не ознакомившись с настоящим Руководством.

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Ванна предназначена для лечебного механического воздействия - гидромассажа позвоночника и околопозвоночных мышц и связок при отсутствии непосредственного контакта тела пациента с массирующей рабочей жидкостью (водой).

1.2. Область применения Ванны – физиотерапевтические отделения больниц, поликлиник, реабилитационных центров. Она может использоваться также в жилых помещениях, учебных и спортивных организациях, офисах, оздоровительных центрах, в косметологических кабинетах, санаториях и домах отдыха.

1.3. Условия эксплуатации Ванны:

- температура окружающей среды: от + 15 до + 24 °С;
- относительная влажность: не более 80 % при температуре + 25 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п.п.	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара	Требуемая величина параметра
2.1	Материал корпуса аппарата Материал ложа аппарата	Специальный стеклопластик на основе полиэфирной смолы, М 105 ТВ высокой прочности и жесткости, устойчивый к агрессивным средам, УФ. Эластичная водонепроницаемая мембрана, устойчивая к дезинфекции толщиной 1,25 мм
2.2	Емкость гидравлической системы аппарата, л	175
2.3	Давление струи форсунки (на поверхность мембраны), атм	1,6
2.4	Диапазон настройки длительности процедуры гидромассажа, мин	От 5 до 30 мин с шагом 1 мин

№ п.п.	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара	Требуемая величина параметра
2.5	Диапазон настройки температуры рабочей жидкости, °С	От 30 до 38 °С с шагом 1 °С
2.6	Время нагрева рабочей жидкости гидросистемы от температуры 18°С до 30°С, мин	Не менее 60
2.7	Режим работы аппарата	Автоматический/ ручной
2.8	Количество программ гидромассажа	8 программ в автоматическом режиме 1 программа ручная
2.9	Количество зон гидромассажа	6
2.10	Массажные гидрофорсунки, шт	24
2.11	Количество насосов, шт.	6
2.12	Способ включения	Пульт управления
2.13	Энергосберегающий режим	Наличие
2.14	Система воздушного охлаждения	Наличие
2.15	Максимальная масса пациента на аппарате, кг	140
2.16	Количество вентиляторов в системе охлаждения, шт	3
2.17	Клапан удаления воздуха из гидравлической системы	Наличие
2.18	RGB подсветка	Наличие
2.19	Включение/отключение подсветки	С пульта управления
2.20	Ручной пульт управления с цветным жидкокристаллическим дисплеем	Наличие
2.21	Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В	(220±10%)
2.22	Максимальная потребляемая мощность, Вт	3500
2.23	Уровень шума, дБА	Не более 70
2.24	Габаритные размеры аппарата, мм, (Д x Ш x В) ± 5мм	2295x1000x615
2.25	Рабочая поверхность мембраны, мм, (Д x Ш) ± 5мм	695x1960
2.26	Потенциальный риск применения	Класс 2а в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 51609
2.27	По воспринимаемым механическим воздействиям	Группа 1 по ГОСТ Р 50444
2.28	По последствиям отказа	Класс В по ГОСТ Р 50444
2.29	Монтаж электрической части	Соответствует ГОСТ Р 50267.0 и РДТ 25 106

№ п.п.	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара	Требуемая величина параметра
2.30	По электромагнитной совместимости	Соответствует ГОСТ Р 50267.0.2
2.31	По безопасности	Соответствует ГОСТ Р 50267.0
2.32	В части электробезопасности	Класс 1 с рабочей частью типа В
2.33	Масса ванны (без рабочей жидкости)	200+3% кг

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплектность Apparata приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Ванна гидромассажная бесконтактная «Аква-релакс»	1
2	Подголовник (подушка)	1
3	Пульт управления на гибком кронштейне	1
4	Воронка	1
5	Поручни транспортировочные	4
6	Насадка для клапана	1
7	Быстрорастворимые хлорные таблетки (с инструкцией по применению)	1
8	Руководство по эксплуатации	1

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ. СБОРКА ВАННЫ

4.1. Чертежи и фотографии, поясняющие конструкцию Ванны.

На рисунках показаны:

- рис. 1 – упрощенная конструктивная схема Ванны;
- рис. 2 – структурная схема Ванны;
- рис. 3 – гидравлическая схема Ванны.
- рис. 4 – схема заливки рабочей жидкости в Ванну;
- рис. 5 – схема слива рабочей жидкости из Ванны;

На фотографиях показаны:

- фото 1 – внешний вид Ванны;
- фото 2 – размещение пациента на Ванне.

4.2. Описание конструкции Ванны.

Apparatus содержит стеклопластиковую ванну 1 для хранения рабочей жидкости, герметично закрытую сверху тонкой эластичной водонепроницаемой мембраной 2, металлический каркас 3, на котором установлена ванна 1 и стеклопластиковый кожух 4, закрывающий снаружи каркас 3. Ванна в рабочем состоянии стоит на полу на двух парах регулируемых по высоте опор 5 (рис.1).

На верхней поверхности Ванны в ее головной части 6 расположены выключатель 7 «Сеть». На торце Ванны в ее ножной части 9 установлена вентиляционная решетка 10. Ванна снабжена сетевым кабелем 11, длиной 3 м.

Между дном ванны 1 и дном каркаса 3 расположен агрегатный отсек (рис. 2), в котором размещены гидравлическая система Ванны, вентиляторы 12.1, 12.2, 12.3, а также электронный блок управления 13.

Гидравлическая система содержит шесть гидромассажных насосов 14, насос циркуляционный, двадцать четыре форсунки 15, кран 16, сливную пробку 17, шланг 18, воронку 19 (рис. 4, 5).

Форсунки 15 установлены в отверстиях на дне ванны 1 и соединены с выходами гидромассажных насосов 14. Вентилятор 12.1 установлен напротив решетки 10. Вентиляторы 12.2, 12.3 установлены на дне каркаса.

Гидравлическая система снабжена встроенными в ванну 1 электрическим нагревателем 20 рабочей жидкости, датчиком температуры 21 и датчиком уровня воды, установленным на боковой наружной поверхности ванны.

Управление работой ванны осуществляется с помощью пульта управления 22 на гибком кронштейне (рис. 1). Ванна снабжена звуковым сигнализатором 23 (рис. 2).

Ванна снабжена подголовником 24, подкладываемым под голову пациента во время приема процедур.

Заземление Ванны обеспечивается заземляющей шиной, которая с помощью сетевого кабеля 11 подключается к системе заземления потребителя согласно п.11.2.

4.3. Назначение и функции конструктивных элементов Ванны.

Ванна 1 обеспечивает хранение циркулирующей в ней рабочей жидкости. Водонепроницаемая мембрана 2 предназначена для размещения на ней пациента во время приема процедур гидромассажа и представляет собой тонкую и прочную пленку, обеспечивающую исключение непосредственного контакта тела пациента с рабочей жидкостью и в то же время передающую на спину пациента массажные действия струй рабочей жидкости. При этом сохраняются все лечебные эффекты, присущие водолечению.

Металлический каркас 3, установленный на опорах 5, является главным несущим и связующим конструктивным узлом Ванны и обеспечивает ее жесткость и устойчивость во время проведения процедур.

Кожух 4 предназначен для защиты от механических повреждений элементов и узлов Ванны, размещенных в ее агрегатном отсеке, и улучшения при этом эстетических свойств внешнего вида Ванны.

Вентиляторы 12 вместе образуют систему принудительного охлаждения рабочей жидкости Ванны во время процедур.

Электронный блок управления 13 предназначен для реализации записанной в нем программы процедур путем обработки поступающей на его входы информации и выдачи управляющих сигналов на отдельные узлы и агрегаты Ванны.

Насосы 14 вместе с форсунками 15 предназначены для формирования массажных струй рабочей жидкости в ванне 1.

Через кран 16 производится заливка или слив рабочей жидкости.

Датчик температуры 21 предназначен для формирования сигналов, пропорциональных температуре рабочей жидкости. Электрический нагреватель 20 обеспечивает подогрев рабочей жидкости в гидравлической системе Ванны при выполнении процедур. Датчик температуры 21 и нагреватель 20 совместно с блоком управления 13 образуют систему регулирования температуры рабочей жидкости в ванне 1.

Насос циркуляционный обеспечивает перемещение рабочей жидкости в ванне во время работы встроенного тэна для нагрева жидкости.

Датчик уровня воды предназначен для блокирования запуска и работы ванны при отсутствии в ней жидкости.

Звуковой сигнализатор 23 обеспечивает звуковое информирование медработника и пациента о работе Ванны.

Выносной пульт управления 22 служит для установки и отображения заданных и текущих значений параметров работы Ванны.

Ванна предназначена для водного массажа пациента без погружения его в воду и обеспечения тем самым эффективного лечебно-массажного воздействия на позвоночный столб и околопозвоночные мышцы и связки пациента бесконтактным («сухим») методом. Отсутствие прямого воздействия водной среды на пациента резко снижает число противопоказаний к применению данного метода лечения, а также риск инфекционных заболеваний.

4.4. Описание пульта управления, настройка значений пульта управления.




Пульт управления изготовлен в пластиковом корпусе, имеет цифровой графический дисплей и пленочную клавиатуру, состоящую из пяти кнопок (+, -, ОК, ПУСК, СТОП/ПАУЗА). Внешний вид пульта управления представлен на рисунке.



Переход между иконками параметров процедуры осуществляется кнопками (+, -). Для выделения иконки рядом с ней отображается желтый курсор. При достижении последней иконки осуществляется возврат к первой иконке.

Вход в режим изменения параметра осуществляется при помощи кнопки (OK). При этом появляется установленное значение параметра, рядом с которым отображается подсказка с указанием кнопок, осуществляющих настройку. Изменение параметров осуществляется кнопками (+, -). Если соответствующая кнопка удерживается нажатой, значение изменяется непрерывно. Запоминание установленного значения осуществляется при помощи кнопки (OK).


Кнопка  осуществляет запуск процедуры.

Кнопка  осуществляет переход в режим «Пауза». В режиме «Пауза» возможно изменение параметров процедуры. Нажатие кнопки  продолжит выполнение процедуры. Повторное нажатие кнопки  из режима «Пауза» остановит процедуру.

На дисплее изображены следующие пиктограммы:

Пиктограмма параметра «Время процедуры» отображает оставшееся до завершения время процедуры. Если время процедуры закончилось, а программа не прошла цикл до конца, то на дисплее в иконке «Время процедуры» пишется «завершение процедуры».


Пиктограмма параметра «Температура воды» отображает заданное значение температуры рабочей жидкости и реальную температуру. Если при включенном нагревателе 23 текущее значение температуры рабочей жидкости меньше заданного


значения, то на пульте горит индикатор нагрева жидкости . При нагреве жидкости в ванне выше заданного значения (перегрев), индикатор нагрева меняется на индикатор

включения вентилятора охлаждения . Если была нажата кнопка  и аппарат

находится в режиме «Пауза», то индикаторы нагрева  и включения вентиляторов 


меняются на пульсирующий индикатор «Пауза» .

Пиктограмма «Подсветки» предназначена для включения/отключения подсветки ванны. Включение или отключение осуществляется кнопкой . Включенная подсветка отличается интенсивностью цвета значка пиктограммы.

Пиктограмма параметра «Программа процедуры» отображают название выбранной программы процедуры. Изменение программы осуществляется нажатием кнопки .

Пиктограмма параметра «Зоны массажа» отображают номер выбранного (включенного) гидромассажного насоса 14. Включенный насос 14 отличается интенсивностью цвета.

4.5 Сборка Ванны.

 **ВНИМАНИЕ!** В холодный период года (при температуре ниже 0°C) Ванну после распаковки необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 5 часов.

Инструменты, необходимые при сборке Ванны:

- ключ гаечный на «13» - 2 шт.;
- ключ гаечный на «14» - 1 шт.

Сборка Ванны производится в следующей последовательности:

- разобрать укладочный ящик, снять упаковочную пленку с Ванны;
- аккуратно снять кожух 4 для обеспечения доступа к металлическому каркасу 3;
- отделить каркас 3 от поддона упаковочного ящика отвинчиванием гаек с крепежных шпилек и опустить каркас 3 на пол. В рабочем положении Ванна должна стоять на четырех регулируемых по высоте опорах 5, расположенных в нижней части каркаса.

 **ВНИМАНИЕ!** При подъеме, опускании и перемещении не допускается поднимать за края ванны.

- после заливки рабочей жидкости в ванну (п.4.6) следует установить тумблер на блоке управления 13 в положение «Вкл» (вверх). Там же подсоединить пульт управления (ПУ) к разъему;
- после завершения всех пусконаладочных работ установить тумблер в положение «Выкл» (вниз), отсоединить от разъема ПУ.
- установить ПУ 22 на кожух 4, там же соединить разъем;
- завести кожух 4 на верхний периметр аппарата, аккуратно опустить его на высоту 30 см от уровня пола, соединить разъем 30, опустить кожух (следить, чтобы провод от ПУ 22 не был зажат между кожухом 4 и ванной 1);
- вставить вилку сетевого кабеля в розетку 220 В. При этом параметры питающей сети должны обеспечивать потребляемый Ванной ток в 16 А, заземление согласно п.11.2. После этого Ванна готова к проведению процедур согласно раздела 8 Руководства.

4.6 Заливка рабочей жидкости в Ванну

⚠ ВНИМАНИЕ! Ванна поставляется без рабочей жидкости, а также с вывернутыми накидными гайками на всасывающих патрубках гидромассажных насосов 14. В связи с этим перед заливкой рабочей жидкости в гидравлическую систему Ванны следует затянуть до упора все указанные накидные гайки (гайки затягиваются от руки).

В гидравлическую систему Ванны следует заливать предварительно подготовленную рабочую жидкость необходимого количества и качества. Требуется заливать дистиллированную воду в объеме 175 л, перед заливкой добавить в воду дезинфицирующие быстрорастворимые таблетки «Жавель Абсолют» в количестве 5 шт. (входит в комплект поставки). При этом, для выхода воздуха из гидравлической системы, необходимо открутить заглушку спускового клапана 31, установленного на мембране в ножной части 9 Ванны.

Заливка рабочей жидкости производится (рис.4) через воронку 19 со шлангом 18, другой конец которого соединен со штуцером крана 16, подключенного к самой нижней точке гидравлической системы Ванны. Для этого необходимо установить Ванну на полу таким образом, чтобы её ножная часть 9 была несколько выше его головной части 6. Непосредственно перед заливкой следует поднять воронку 19 со шлангом 18 выше верхней кромки ванны 1 и открыть кран 16. При этом под давлением жидкости воздух из гидравлической системы при заливке будет выходить через открытый спусковой клапан 31. Для приподнимания спускового клапана используется прилагаемая насадка.

Рабочую жидкость следует заливать до тех пор, пока она не потечет через открытый спусковой клапан, далее следует закрыть спусковой клапан 31. Закрыть кран 16.

⚠ ВНИМАНИЕ! При использовании для подключения Ванны к электросети 220 В дополнительно переноски-удлинителя необходимо принять меры по исключению попадания воды на его розетки, в частности, не размещать переноску-удлинитель на полу вблизи Ванны.

- вставить вилку сетевого кабеля в розетку 220 В;
- включить Ванну кнопкой «Сеть»;

- удалить воздух из насоса циркуляционного. Для этого установить переключатель режимов работы в положение «III», выкрутить (не до конца) винт для удаления воздуха (см. фото), защитив электрические части от попадания жидкости. После того, как вода, выходящая из насоса, перестанет содержать воздух, винт завернуть. После пуска насоса и удаления воздуха необходимо установить переключатель в режим работы «I»;



- кнопкой «Пуск» на пульте 22 в ручном режиме поочередно включать все насосы 14 (каждый на 15-20 сек);
- далее кнопкой «СТОП/ПАУЗА» пульта 22 остановить процедуру;
- убедиться в герметичности всех соединений гидравлической системы.

Далее из под мембраны 2 следует выпустить остатки воздуха через клапан 31, используя насадку. Закрыть клапан 31. Долить в Ванну рабочую жидкость, используя описанную выше последовательность действий.

После заливки Ванну возвращают в исходное горизонтальное положение. В таком положении под мембраной 2 не должно быть воздушных «пузырей». Визуально поверхность мембраны должна иметь выпуклую форму.

Далее необходимо:

- кнопкой «ПУСК» на пульте запустить процедуру (любую программу, кроме «ручной») и в течение 10-15 мин наблюдать за работой насосов Ванны;
- кнопкой «СТОП/ПАУЗА» на пульте остановить процедуру, выключить Ванну кнопкой «Сеть» и вынуть вилку сетевого кабеля из розетки 220 В;
- повторно проверить герметичность гидравлической системы Ванны, отсутствие подтеков из соединений.

После этого установить кожух 4 обратно на место, соединив разъем 30, в соответствии с п. 4.5.

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ВАННЫ

Электронный блок управления 13 вместе с выносным пультом управления 22 и соответствующим программным обеспечением образуют систему управления работой Ванны. Данная система предназначена для реализации следующих основных ее функций:

- автоматический режим управления работой насосов 14, при котором по выбору реализуются восемь различных программ гидромассажа (релаксация, интенсивная, силовая, пульсирующая, случайная, встречная, перекрестная, грудная);
- ручной режим управления работой насосов 14 (программа - «ручная»);
- автоматическое управление обогревом рабочей жидкости Ванны;
- автоматическое управление работой вентиляторов 12;
- автоматическая блокировка работы Ванны при достижении температуры рабочей жидкости 42 °С;
- автоматический перевод Ванны в «спящий» режим при ее длительном простое (в режим экономии электроэнергии).

6. ПРОГРАММЫ ГИДРОМАССАЖА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ВАННЫ

6.1. Программа гидромассажа «Релаксация».

В таблице 6.1 приведен алгоритм работы первого цикла насосов Ванны. Во втором и последующих циклах алгоритм и длительность работы насосов аналогичен первому циклу.

Таблица 6.1

№ цикла	Номер насоса (поз.14)	Текущее время момента включения насоса (сек)	Текущее время момента отключения насоса (сек)
Первый	1	с 1	по 27
	2	с 22	по 48
	3	с 43	по 70
	4	с 66	по 92
	5	с 87	по 113
	6	с 113	по 138

6.2. Программа гидромассажа «Интенсивная».

В таблице 6.2 приведен алгоритм работы первого цикла насосов Ванны. Во втором и последующих циклах алгоритм и длительность работы насосов аналогичен первому циклу.

Таблица 6.2

№ цикла	Номер насоса (поз.14)	Текущее время момента включения насоса (сек)	Текущее время момента отключения насоса (сек)
Первый	1	с 1	по 20
	2	с 17	по 37
	3	с 34	по 55
	4	с 50	по 71
	5	с 67	по 87

6.3. Программа гидромассажа «Силовая».

В данном режиме в пределах одного цикла одновременно работают по два насоса. Последовательность работы насосов: 1-2→3-4→5-6. Количество циклов зависит от заданного времени процедуры.

В таблице 6.3 приведен алгоритм работы первого цикла насосов Ванны. Во втором и последующих циклах алгоритм и длительность работы насосов аналогичен первому циклу.

Таблица 6.3

№ цикла	Номер насоса (поз.14)	Текущее время момента включения насоса (сек)	Текущее время момента отключения насоса (сек)
Первый	1	с 1	по 25
	2	с 2	по 25
	3	с 26	по 50
	4	с 27	по 50
	5	с 51	по 75
	6	с 52	по 75

6.4. Программа гидромассажа «Пульсирующая».

В данном режиме одновременно работает один насос. Длительность работы одного насоса 22 секунды. При включении следующего насоса, предыдущий насос отработывает параллельно в режиме пульсации три раза по 1 секунде. Количество циклов зависит от заданного времени процедуры.

В таблице 6.4 приведен алгоритм работы первого цикла насосов Ванны. Во втором и последующих циклах алгоритм и длительность работы насосов аналогичен первому циклу.

Таблица 6.4

№ цикла	Номер насоса (поз.14)	Текущее время момента включения насоса (сек)	Текущее время момента отключения насоса (сек)
Первый	1	с 1	по 22
	1	с 23	по 24
	1	с 25	по 26
	1	с 27	по 28
	2	с 22	по 37
	2	с 38	по 39
	2	с 41	по 42
	2	с 43	по 44
	3	с 37	по 53
	3	с 54	по 55
	3	с 56	по 57
	3	с 58	по 59
	4	с 53	по 70
	4	с 71	по 72
	4	с 73	по 74
	4	с 75	по 76
	5	с 70	по 85
	5	с 87	по 88
	5	с 89	по 90
	5	с 91	по 92
	6	с 85	по 100
	6	с 102	по 103
	6	с 104	по 105
	6	с 106	по 107

6.5. Программа гидромассажа «Встречная»

В данном режиме одновременно работают два насоса. Последовательность работы насосов в пределах одного цикла: «3-4»→«2-5»→«1-6». Количество циклов зависит от заданного времени процедуры.

В таблице 6.5 приведен алгоритм работы первого цикла насосов Ванны. Во втором и последующих циклах алгоритм и длительность работы насосов аналогичен первому циклу.

Таблица 6.5

№ цикла	Номер насоса (поз.14)	Текущее время момента включения насоса (сек)	Текущее время момента отключения насоса (сек)
Первый	3	с 1	по 13
	4	с 2	по 13
	2	с 14	по 26
	5	с 15	по 26
	1	с 27	по 49
	6	с 28	по 49

6.6. Программа гидромассажа «Грудная»

В данном режиме работает постоянно насос номер №3. Остальные включаются в круговой последовательности в пределах цикла: «1→2→4→5→6». Количество циклов зависит от заданного времени процедуры.

В таблице 6.6 приведен алгоритм работы первого цикла насосов Ванны. Во втором и последующих циклах алгоритм и длительность работы насосов аналогичен первому циклу.

Таблица 6.6

№ цикла	Номер насоса (поз.14)	Текущее время момента включения насоса (сек)	Текущее время момента отключения насоса (сек)
Первый	3	с 1	по 34 и т.д
	1	с 2	по 7
	2	с 8	по 14
	4	с 15	по 20
	5	с 21	по 27
	6	с 28	по 34

6.7. Программа гидромассажа «Перекрестная»

В данном режиме постоянно в течении 32 секунд работает один насос. Соседние с ним насосы работают в режиме пульсации по 4 секунды. В пределах одного цикла работа основных насосов движется в следующей последовательности: 2→3→4→5→2. Количество циклов зависит от заданного времени процедуры.

В таблице 6.7 приведен алгоритм работы первого цикла насосов Ванны. Во втором и последующих циклах алгоритм и длительность работы насосов аналогичен первому циклу.



Таблица 6.7

№ цикла	Номер насоса (поз.14)	Текущее время момента включения насоса (сек)	Текущее время момента отключения насоса (сек)
Первый	2	с 1	по 32
	3	с 5	по 9
	1	с 13	по 17
	3	с 21	по 25
	1	с 28	по 32
	3	с 33	по 64
	4	с 37	по 41
	2	с 45	по 49
	4	с 53	по 57
	2	с 60	по 64
	4	с 65	по 97
	5	с 70	по 74
	3	с 78	по 82
	5	с 85	по 89
	3	с 93	по 97
	5	с 98	по 129
	6	с 102	по 106
	4	с 109	по 113
6	с 117	по 121	
4	с 125	по 129	

6.8. Программа гидромассажа «Случайная»

В данном режиме гидромассажа одновременно работает только один насос. Выбор работающего насоса происходит программой автоматически в случайном порядке. Длительность работы одного насоса 17 секунд.

7. РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ВАННОЙ

Массажуемый участок тела пациента (от шеи до икроножных мышц) условно разделен на шесть последовательно расположенных зон гидромассажа. При ручном режиме управления работой насосов 14 возможен гидромассаж каждой из них по отдельности (шесть т.н. «частичных» зон гидромассажа). Длительность массажа в каждой зоне определяется медработником с учетом рекомендаций лечащего врача и пожеланий пациента. Изменение зоны массажа выполняется кнопками ,  как во время выполнения процедуры, так и в режиме пауза.

8. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР ГИДРОМАССАЖА

8.1. Подготовка Ванны к проведению процедур.

Произвести внешний осмотр Ванны. Последняя перед выполнением процедуры должна устойчиво стоять на полу на всех опорах 5.

⚠ ВНИМАНИЕ! При использовании для подключения Ванны к электросети 220 В дополнительной переноски-удлиителя необходимо принять меры по исключению попадания воды на его розетки, в частности, не размещать переноску-удлинитель на полу вблизи Ванны.

Для подключения Ванны к сети 220 В необходимо нажать на кнопку 9 «Сеть», расположенную на верхней части Ванны.

⚠ ВНИМАНИЕ! Параметры питающей сети должны обеспечивать потребляемый Ванной ток в 16 А, напряжение – 220 В.

С подачей питающего напряжения автоматически включается режим инициализации системы управления Ванной. Длительность инициализации составляет около 10 сек.

По завершении инициализации на дисплее пульта 22 отображаются текущие (исходные) значения параметров процедуры. После этого Ванна готова к вводу (изменению) необходимых параметров процедуры.

8.2. Размещение пациента на Ванне.

Желательно, чтобы перед приемом процедур пациент был одет в легкий спортивный костюм.

Пациент размещается на Ванне спиной вниз. При этом его голова должна располагаться в головной части ванны 6, а линия его позвоночника должна совпадать с продольной осью Ванны.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание нарушения целостности мембраны 2 категорически запрещается укладывать на нее пациента при наличии в карманах его верхней одежды колющих и режущих предметов (авторучка, карандаш, ключи, нож, булавка и т.п.), которые могут повредить герметичность мембраны. На повреждения мембраны такого вида гарантийное обслуживание завода-изготовителя не распространяется.

Примечание. Нагреватель 20 рабочей жидкости Ванны включается автоматически по завершении режима инициализации. Время нагрева рабочей жидкости гидросистемы от комнатной температуры (18 °С) до 25 °С составляет не менее 60 мин (зависит, в основном, от температуры окружающей среды). При этом пациент должен размещаться на Ванне только после достижения температуры рабочей жидкости не менее 30 °С.

В зависимости от заболевания и состояния пациента медработник определяет методику и режим лечебного воздействия на его позвоночник и околопозвоночные мышцы и связки с помощью данной Ванны.

8.3. Этапы лечебной процедуры.

Лечебные процедуры на Ванне выполняются в 3 этапа:

- ввод (задание) параметров процедуры;
- непосредственное выполнение процедуры;
- послепроцедурный покой.

Первые два этапа отображаются на экране пульта управления 22.

8.4. Виды программ гидромассажа. Частичные зоны гидромассажа.

При выполнении процедур в автоматическом режиме могут быть реализованы следующие восемь программ гидромассажа:

- «релаксация»;
- «интенсивная»;
- «силовая»;
- «пульсирующая»;
- «встречная»;
- «перекрестная»;
- «грудная»;
- «случайная».


8.5. Виды параметров процедуры гидромассажа.

При выполнении процедур могут быть заданы следующие параметры процедуры:

- «температура воды»;
- «время процедуры»;
- «программа массажа»;
- «зоны массажа» (при ручном режиме).

8.6. Установка значений параметров процедуры. Запуск, выполнение и останов процедуры.


Значения параметров работы Ванны могут быть введены (изменены) с помощью выносного пульта 22 как перед запуском процедуры, так и в процессе ее выполнения.


Выбор вида параметра и изменение его значения на пульте 22 осуществляется нажатием соответствующих кнопок пульта 22: .

Параметр, выбранный для изменения (т.н. «активный параметр») на панели пульта управления 22 выделяется курсором желтого цвета

Запуск процедуры осуществляется нажатием кнопки «ПУСК» выносного пульта управления 22. При этом звуковым сигнализатором 23 формируется однократный звуковой сигнал и включаются соответствующие насосы 14.

Для работы ванны в автоматическом режиме необходимо путем нажатия соответствующей кнопки пульта 22 выбрать одну из восьми программ (кроме «ручной») и далее нажать кнопку «Пуск».

Для перехода в ручной режим работы Ванны необходимо выбрать «ручную» программу гидромассажа и далее нажать на кнопку «ПУСК». После этого становится доступным выбор необходимой зоны массажа. Выбор зоны массажа выполняется кнопками , как во время выполнения процедуры, так и в режиме пауза.

При работе Ванны в ручном режиме автоматического завершения процедуры не происходит. Останов процедуры достигается нажатием кнопки  пульта 22.

Завершение процедуры при работе Ванны в автоматическом режиме происходит автоматически по истечении заданного времени (длительности) процедуры или при нажатии кнопки «СТОП/ПАУЗА» на клавиатуре пульта 22.

Завершение процедуры в обоих режимах сопровождается двухкратным звуковым сигналом сигнализатора 23.

8.7. Послепроцедурный покой.

По завершении процедуры рекомендуется пациенту некоторое время (не менее 3-5 мин) провести на Ванне в горизонтальном (расслабленном) положении.

9. РАБОТА ВАННЫ В РЕЖИМЕ «ПЕРЕГРЕВ»

9.1. Переход работы Ванны в режим «Перегрев» происходит автоматически в случае достижения температуры ее рабочей жидкости значения 42 °С. При этом система управления Ванны блокирует ее работу до тех пор, пока температура рабочей жидкости не понизится до допустимого значения (38°С).

9.2. Если перегрев рабочей жидкости возник в процессе выполнения процедуры, происходит немедленная остановка всех насосов 14, а на дисплее пульта появляется информационное окно «Перегрев».

9.3. Переход Ванны в режим перегрева сопровождается многократными звуковыми сигналами.

9.4. В случае отключения аппарата из-за перегрева автоматически включается система охлаждения (определяется шумом работы вентилятора). После охлаждения аппарата до установленного значения можно приступить к процедурам массажа.

⚠ ВНИМАНИЕ! Для обеспечения нормальной работы аппарата в заданных температурных интервалах необходимо обеспечить температуру воздуха в помещении 20-24°С.

9.5. При повышенной температуре воздуха в помещении (выше 20-24°С) для нормальной работы аппарата рекомендуется установить в помещении кондиционер.

10. РАБОТА ВАННЫ В «СПЯЩЕМ» РЕЖИМЕ

10.1. В случае, если включено электропитание Ванны, но при этом никакая процедура не запускалась в течение последних 3-х часов, ее система управления переводит оборудование в «спящий» режим, т.е. режим с минимальным энергопотреблением.

На дисплее появляется информационное окно «Спящий режим»:



10.2. Обогрев рабочей жидкости Ванны в «спящем» режиме автоматически отключается.

10.3. Вывод Ванны из «спящего» режима обеспечивается нажатием любой из кнопок клавиатуры пульта управления 22.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Требования к персоналу, эксплуатирующему Ванну. К работе с Ванной допускаются лица, имеющие медицинскую квалификацию, изучившие в полном объеме настоящее

Руководство и имеющие разрешение на работу с Ванной главного специалиста медицинского учреждения, в котором она эксплуатируется.

11.2. Требования к подключению. Заземление обеспечивает потребитель в месте подключения Ванны к электросети. Заземляющий проводник подключается к контуру заземления по системе TN-S (TN-C-S) согласно ГОСТ Р 50571, а не к «нулевому» проводу по системе TN-C. Потребитель обязан подсоединить к каркасу ванны отдельную шину заземления, при этом использование отопительных и водопроводных труб в качестве заземления не допускается. Место подсоединения указано соответствующими знаками.

Следует периодически (не реже одного раза в месяц) проверять исправность заземляющих устройств Ванны.

11.3. Начало эксплуатации. Перед началом работы следует убедиться в полной исправности Ванны, визуально проверить исправность сетевого кабеля и вилки.

11.4. Запрещение эксплуатации. Запрещается эксплуатировать Ванну при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждении сетевого кабеля и вилки;
- нечеткой работе пульта управления;
- наличие постороннего шума;
- обнаружении течи рабочей жидкости;
- наличии других неисправностей, обнаруженных перед началом работы.

11.5. Устранение неисправностей. Запрещается устранять обслуживающему персоналу какие-либо неисправности в конструкции Ванны в течение гарантийного срока.

В этом случае рекомендуется обратиться к производителю Ванны за консультацией.

Адреса и телефоны производителя Ванны даны в разделе 21 Руководства.

11.6. Завершение эксплуатации. По завершении эксплуатации необходимо выключить Ванну с помощью выключателя 7 «Сеть» и выдернуть вилку сетевого кабеля из розетки.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1. Техническое обслуживание (ТО) предназначено для выявления неисправностей и предупреждения отказов Ванны.

12.2. При ТО руководствуются разделом 11 настоящего Руководства.

12.3. ТО выполняется при необходимости по результатам контроля технического состояния Ванны, а также после эксплуатации Ванны обслуживающим персоналом.

12.4. При ТО:

- снимают кожух 4 и проводят внешний осмотр Ванны;
- удаляют пыль пылесосом с блока управления и гидросистемы;
- проверяют состояние гидравлической системы Ванны, при необходимости производят устранение нарушения ее герметичности;
- проверяют состояние винтовых соединений, при необходимости производят их подтяжку;
- проверяют состояние и целостность сетевого кабеля и кабеля пульта управления 22;
- проверяют срабатывание выключателя 7 «Сеть» и кнопок на панели пульта управления 22;
- проверяют качество (сопротивление) заземления Ванны;
- удаляют загрязнения с наружной поверхности Ванны и ее деталей; производят их протирку мягкой ветошью. При необходимости проводят дезинфекцию эластичной пленки - мембраны 2 Ванны и остальной ее поверхности путем протирки салфеткой, смоченной 3%-м раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16, а затем салфеткой, смоченной питьевой водой.

По завершении ТО подключают Ванну к электросети и проверяют ее работоспособность.

12.5. ТО производят один раз в полгода специалистами технической службы медицинского учреждения, в котором эксплуатируется Ванна.

12.6. Замена рабочей жидкости в гидравлической системе Ванны.

Замена рабочей жидкости в гидравлической системе производится один раз в два года. Состав рабочей жидкости – вода дистиллированная с добавлением незначительного количества антисептика на основе хлора. Возможно использование маломинерализованной воды или воды, дающей минимальное количество осадков. Емкость гидравлической системы Ванны - 175 л.

12.6.1. Заливка рабочей жидкости в Ванну.

Заливка рабочей жидкости в Ванну описана в разделе 4.6 Руководства.

12.6.2. Слив рабочей жидкости из Ванны.

При сливе рабочей жидкости из Ванны (рис.5) необходимо, для обеспечения поступления воздуха в ее гидравлическую систему, открутить заглушку спускового клапана 31. После этого свободный конец шланга 18 следует соединить с канализацией и открыть вентиль 16. Открутить пробку 17.

Для слива возможных остатков жидкости из остальной части гидросистемы рекомендуется отвернуть на 1-2 оборота накидные гайки на патрубках подвода жидкости у каждого из насосов 14 Ванны. Оставить указанные накидные гайки в отвернутом положении до следующей заливки. А также вывернуть сливные пробки на металлических коллекторах и линии циркуляции рабочей жидкости.

13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

13.1. Возможные неисправности Ванны и методы их устранения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
При нажатии на кнопку «Сеть» ванна не включается	Отсутствует напряжение в сети. Повреждена сетевая кабель. Перегорела подсветка кнопки «Сеть». Сработало УЗО.	Проверить наличие напряжения в сети, исправность сетевого кабеля. Заменить кнопку «Сеть». Устранить причину срабатывания УЗО.
При работе Ванны появляются подтеки рабочей жидкости	Нарушена герметичность гидравлической системы Ванны	Устранить нарушение герметичности гидравлической системы Ванны
Часто срабатывает «Перегрев»	Повышенная температура воздуха в помещении.	Установить кондиционер.
Сильный шум при работе форсунок	Наличие воздуха под мембраной	Повторить п. 4.6 настоящего руководства

14. МАРКИРОВКА

14.1. Маркировка Ванны соответствует конструкторской документации изготовителя и ТУ 9444-003-22636951-2010.

14.2. Наименование Ванны и его обозначение нанесено на боковой панели.

14.3. Маркировка прикреплена к Ванне в виде таблички (этикетки).

15. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

15.1. Упаковка Ванны соответствует требованиям ГОСТ 50444 и ТУ 9444-003-22636951-2010 и предназначена для ее защиты от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

15.2. Эксплуатационная документация размещена в пакетах из пленки. Комплект принадлежностей упакован в коробку из гофрокартона или в полиэтиленовый пакет.

15.3. В потребительскую тару вложен Упаковочный лист, в котором указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- дата упаковки.

15.4. Ванна должна храниться в складском помещении при температуре окружающего воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности до 80% при температуре 25 °С.



ВНИМАНИЕ! Запрещается хранение Ванны в помещениях, где находятся кислоты, щелочи и другие вещества, выделяющие химически активные пары и газы.

16. ТРАНСПОРТИРОВКА

16.1. Транспортировка Ванны производится в таре любым транспортом (воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным) без ограничения скорости и расстояния.

16.2. При погрузке, перевозке и разгрузке недопустимы удары и резкие сотрясения укладочного ящика с Ванной.

17. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

17.1. Срок службы Ванны до списания - не менее 5 лет. Условием предельного состояния Ванны является невозможность или нецелесообразность ее восстановления.

17.2. Срок хранения Ванны – шесть месяцев до пробного запуска.

18. УТИЛИЗАЦИЯ

18.1. Ванна не имеет компонентов, содержащих золото и другие драгоценные металлы. Электронные и электрические компоненты Ванны должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

18.2. Потребителю для получения подробной информации об утилизации оборудования следует обратиться в местные службы, занимающиеся утилизацией подобного оборудования.

18.3. Правильная утилизация позволит предотвратить потенциально вредное воздействие утилизируемого изделия на окружающую среду и здоровье человека.

19. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

19.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Ванны требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящем Руководстве.

19.2. Гарантийный срок эксплуатации Ванны - 12 месяцев со дня ее получения потребителем.

19.3. В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует Ванну и ее узлы. При этом гарантия охватывает заводские дефекты и включает в себя бесплатную замену неисправных узлов и работы по их устранению.

19.4. В течение гарантийного срока эксплуатации Ванны, в случае ее отказа в работе или при обнаружении в ней неисправности, потребителем может быть направлена по факсу или по почте в адрес предприятия-изготовителя Заявка на сервисное обслуживание Ванны. Форма Заявки приведена в конце данного Руководства.

19.5. Предприятие-изготовитель самостоятельно или с привлечением стороннего ремонтного предприятия устраняет неисправность Ванны. В последнем случае по завершении ремонтного обслуживания в адрес предприятия-изготовителя направляется (отрывной) гарантийный талон, размещенный в конце данного Руководства.

19.6. Потребителю запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать Ванну.

19.7. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- при наличии на Ванне механических, тепловых или иных повреждений, являющихся следствием нарушения правил ее хранения, транспортировки и эксплуатации;
- дефектов, возникающих в результате отклонения параметров питающих сетей от параметров, установленных соответствующими стандартами;
- повреждений, вызванных использованием нестандартных или неоригинальных запчастей и расходных материалов, чистящих средств и подобных материалов;
- повреждений, вызванных несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания.
- в случае самостоятельного ремонта Ванны, не согласованного с предприятием-изготовителем.

20. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

20.1. Почтовый адрес предприятия-изготовителя: 450095, г.Уфа, ул. Центральная, д.53/3, ООО НВП «ОРБИТА».

20.2. Электронный адрес: ormed@ormed.ru

20.3. Тел/факс 8(800)700-86-96 (звонок по РФ бесплатный).

20.4. Сайт: www.ormed.ru.

21. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ванна гидромассажная бесконтактная «АКВА-релакс» с заводским № _____ соответствует ТУ 9444-003-22636951-2010 и признана годной для эксплуатации.
Регистрационное удостоверение №ФСР 2011/10259 от 05.03.2011г.

Представитель ОТК _____
(подпись) (ФИО)

“ _____ ” _____ 20__ г.

МП

22. РИСУНКИ И ФОТОГРАФИИ

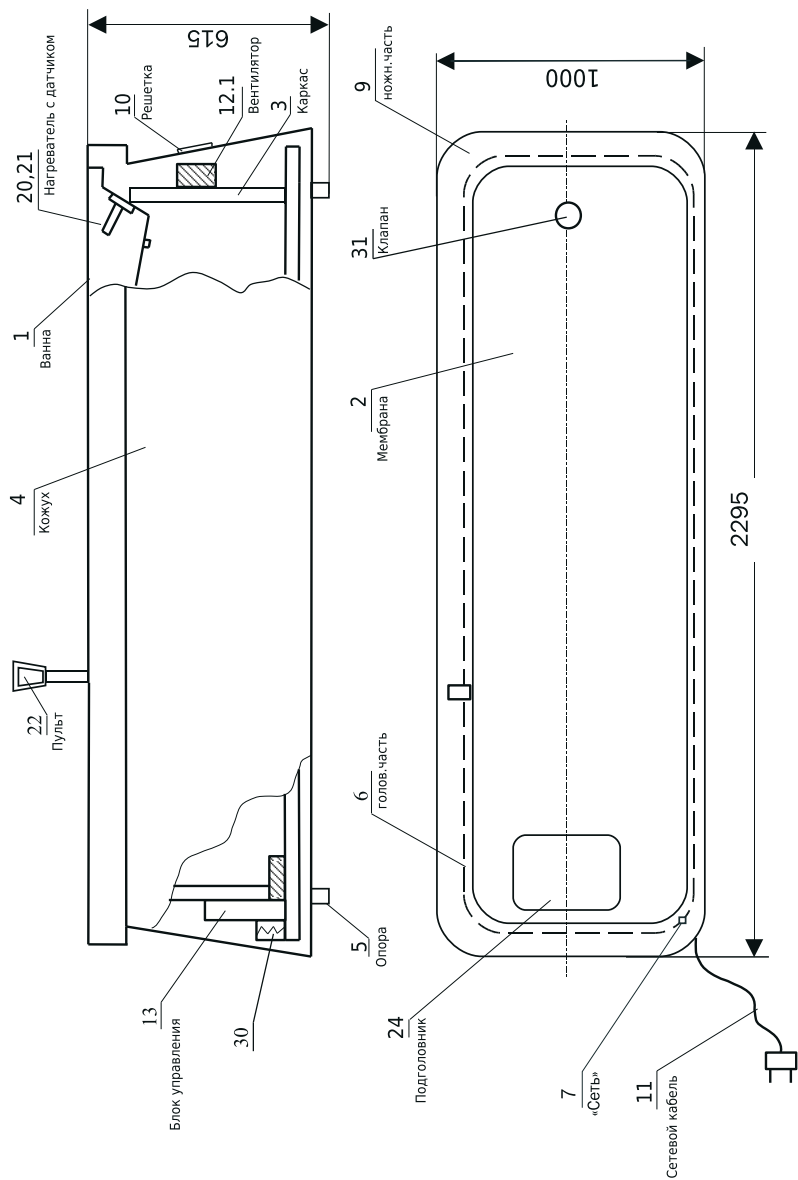


Рис. 1. Упрощенная конструктивная схема Аппарата.


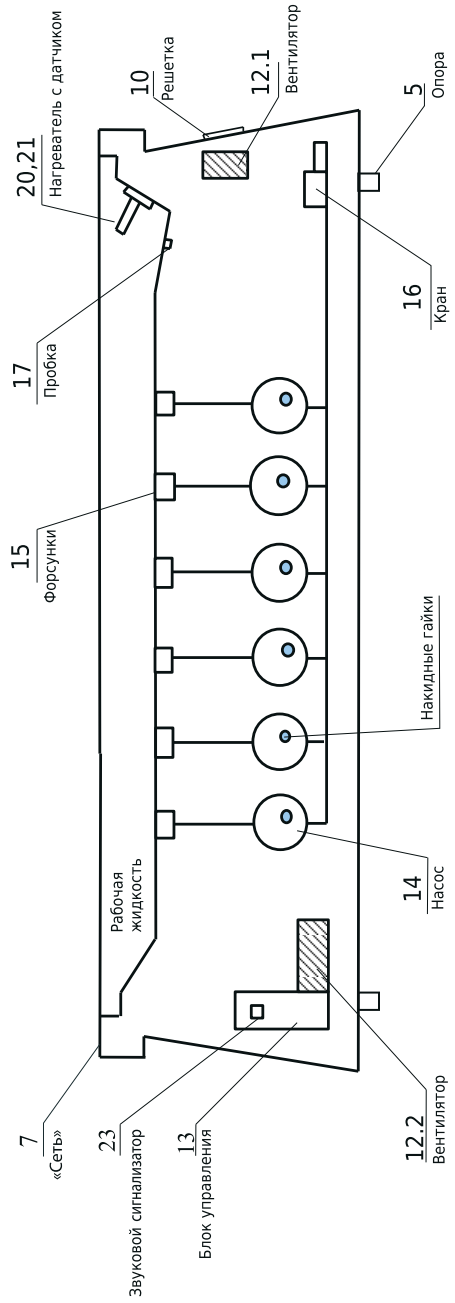


Рис. 2. Структурная схема Аппарата.

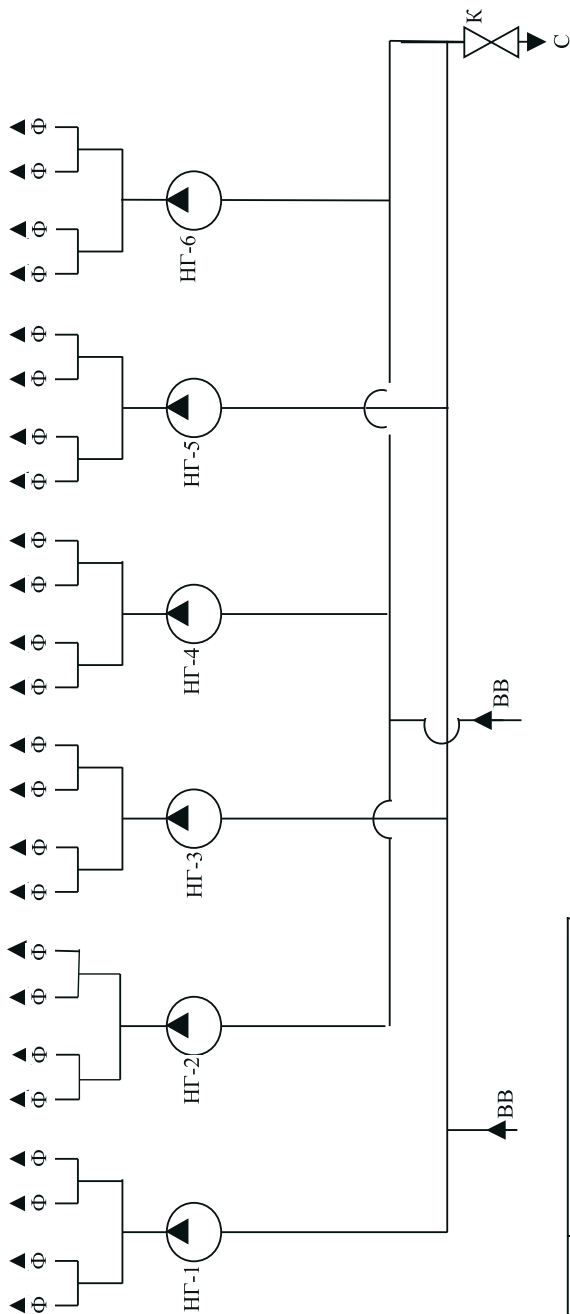

Обозн.	Наименование
НГ	Насос для гидромассажа
Ф	Форсунка
К	Кран
ВВ	Выход из ванны
С	Слив

Рис. 3. Гидравлическая схема Аппарата.

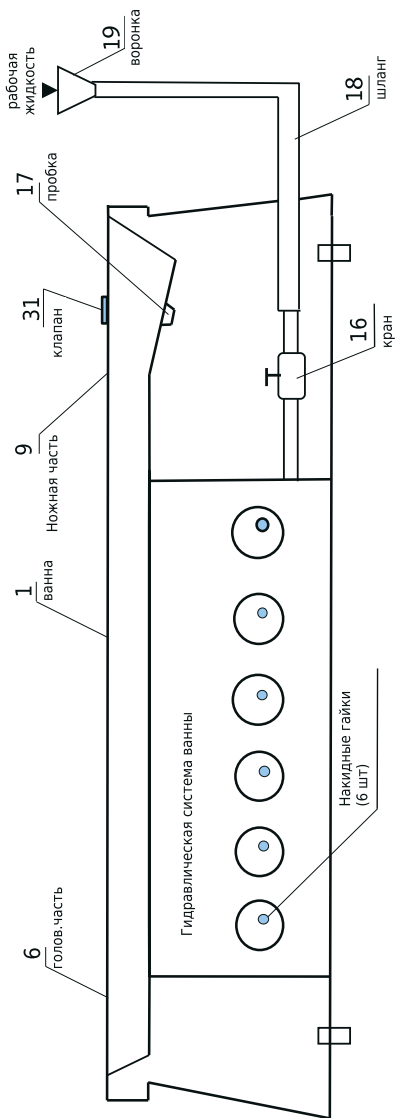


Рис. 4. Схема заливки рабочей жидкости в Аппарат.

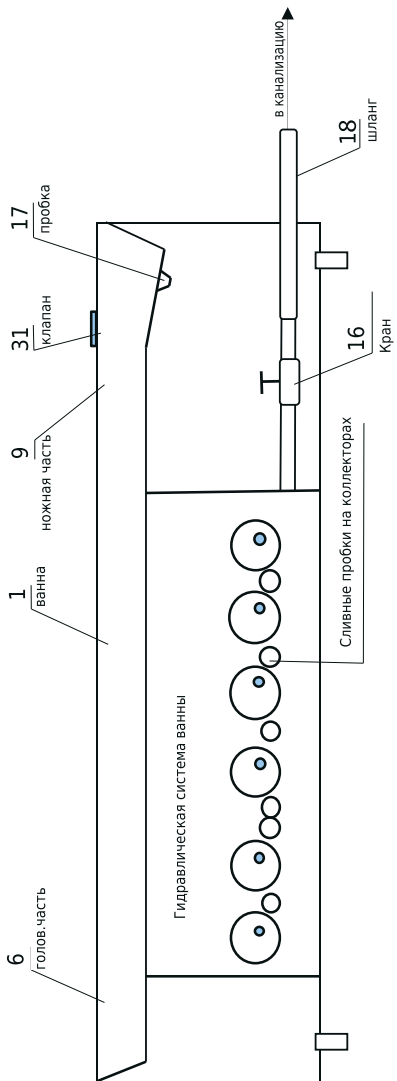


Рис. 5. Схема слива рабочей жидкости из Аппарата.



Фото 1. Внешний вид Ванны.



Фото 2. Размещение пациента на Ванне.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

© ООО НВП «ОРБИТА» 2023

Текст и чертежи: Гиниятуллин Н.И., Гиниятуллин М.Н.

Подписано в печать 11.12.23 г. Зак. 232. Тир. 35 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Браво Пресс», г. Уфа, ул. Дм. Донского, 5/1а.

ЗАЯВКА НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАЯВКА № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

ЗАПОЛНЯЕТ КЛИЕНТ

Модель «ОРМЕД АКВА-релакс» Заводской номер: _____

Дата выпуска: _____ Дата продажи: _____

Владелец: _____

или Заявитель: _____

Адрес установки аппарата: _____

Код города: _____ Тел: _____ Факс: _____

e-mail: _____ Мобильный тел: _____

Контактное лицо _____ Должность: _____

Характер неисправности _____

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Что сделано: _____

Отправка запчастей (Что отправлено, дата отправки): _____

Причина неисправности: _____

Корректирующие действия: _____

Прием заявок:

Инженер по сервисному обслуживанию _____

Заполненную заявку отправить по тел./факсу: +7 (347) 227-33-66
или по электронной почте: service@ormed.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ванна гидромассажная бесконтактная «АКВА-релакс»

Заводской номер 0350 _____ Дата выпуска « _____ » _____ 20__ г.

Представитель ОТК _____ Модификация _____

ФИО, печать

Адрес предприятия-изготовителя: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/ 3, ООО «НВП «Орбита».

Тел. (347) 227-33-66, тел./факс (347)227-15-18

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г. Продавец _____

подпись, печать

Поставлен на гарантийное обслуживание _____

наименование ремонтного предприятия

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Содержание ремонта _____

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца, подтверждающая ремонт _____

Дата ремонта « _____ » _____ 20__ г.

печать ремонтного предприятия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ванна гидромассажная бесконтактная «АКВА-релакс»

Заводской номер 0350 _____ Дата выпуска « _____ » _____ 20__ г.

Представитель ОТК _____ Модификация _____

ФИО, печать

Адрес предприятия-изготовителя: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/ 3, ООО «НВП «Орбита».

Тел. (347) 227-33-66, тел./факс (347)227-15-18

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г. Продавец _____

подпись, печать

Поставлен на гарантийное обслуживание _____

наименование ремонтного предприятия

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Содержание ремонта _____

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца, подтверждающая ремонт _____

Дата ремонта « _____ » _____ 20__ г.

печать ремонтного предприятия

